




## Gebrauchshinweise *InfiltraLong*

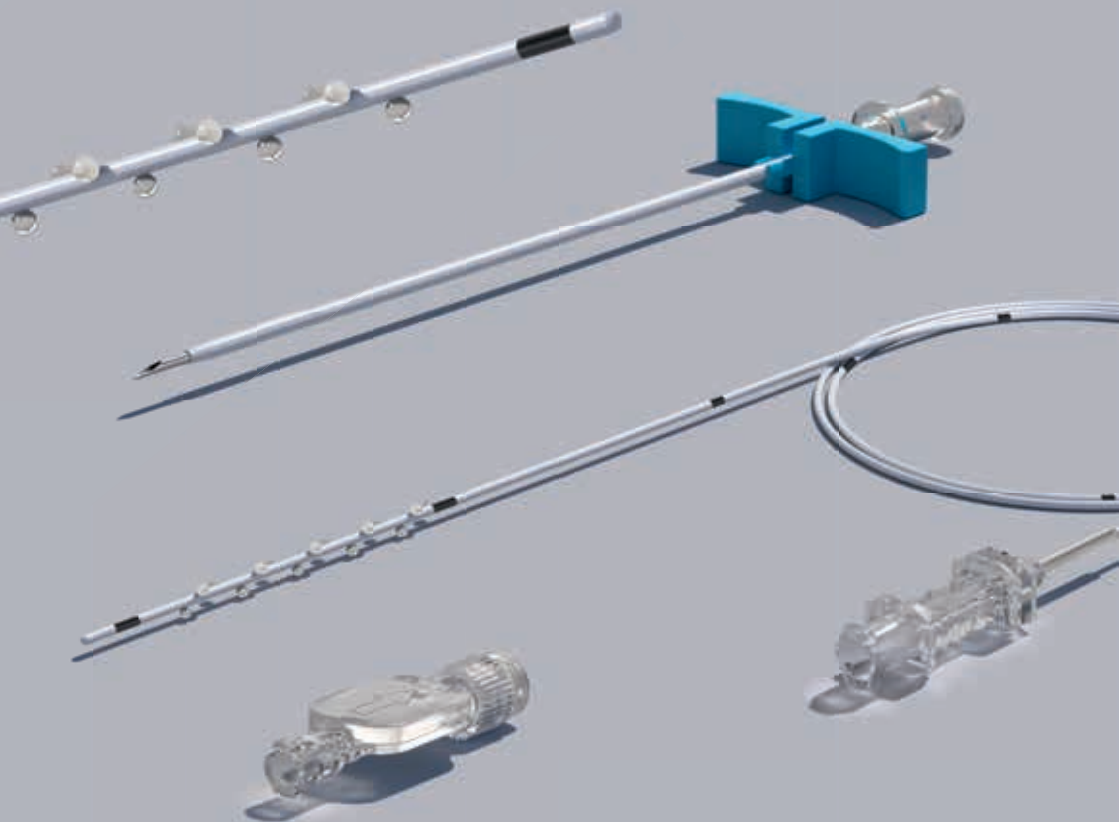

Der PAJUNK® InfiltraLong Katheter ist ein geschlossenes System für kontinuierliche Infiltrationsanalgesie bei chirurgischen Eingriffen. Das Design des Katheters ermöglicht eine zuverlässige Verabreichung des Lokalanästhetikums. Dies ermöglicht eine Optimierung der Patientenanalgesie und die Verbesserung der Ergebnisse bei gleichzeitiger Reduzierung des Opioidverbrauchs. Die breite Produktpalette an Katheter- und Perforationslängen ermöglicht es, den InfiltraLong Katheter in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen einzusetzen. Im Vergleich zu drei handelsüblichen Kathetern, schnitt der InfiltraLong aufgrund der Vielzahl an feinen und präzisen Perforationen, die eng und gleichmäßig auf der Perforationslänge angeordnet sind, äußerst gut ab. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Analgetikums und eine frühere Mobilisierung des Patienten. Der InfiltraLong Katheter ist sowohl als Standardvariante als auch als Forte Variante mit dickerer Wandstärke erhältlich. Der InfiltraLong Katheter ist so konzipiert, dass er mit allen handelsüblichen Infusionspumpen kompatibel ist. Die InfiltraLong Sets gibt es in vielen verschiedenen Konfigurationen, darunter befinden sich Basiskomponenten wie Kanüle und Filter oder auch als Komplettssets mit FuserPump.

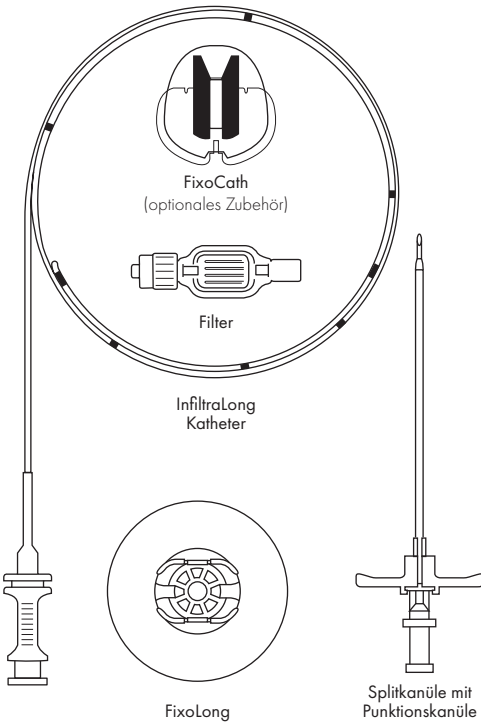


- 1 Spülen Sie den Katheter mit Kochsalz oder Lokalanästhetikum durch – das System ist funktionsfähig, sobald sich entlang der Perforation Tropfen bilden.

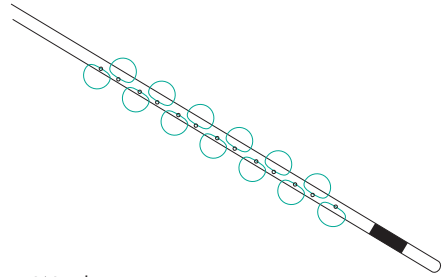


**Warnhinweise:**  
Schneiden Sie den Katheter nicht ab!


- 2 Verwenden Sie die Splitkanüle mit eingeführter Punktionskanüle und stechen ca. 30–50 mm von der Operationswunde entfernt ein. Schieben Sie die Splitkanüle so weit vor, bis die Spitze in der Wunde sichtbar ist.

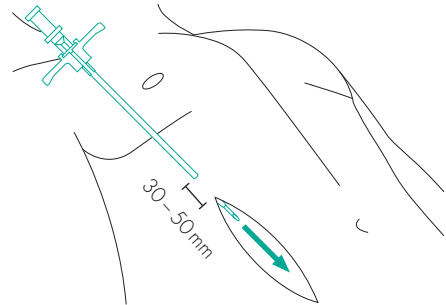


- 3 a) Lösen Sie die Verbindung der Splitkanüle und entfernen Sie die Punktionskanüle.

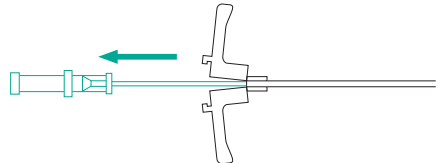


- b) Führen Sie anschließend den Katheter in die Splitkanüle ein.

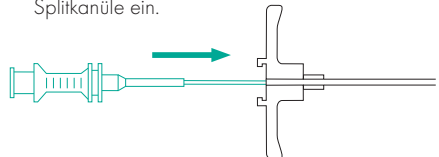


- 4 Positionieren Sie die komplette Perforationslänge des Katheters in der Wunde. (Bitte stellen Sie sicher, dass sich das komplette Perforationssegment in der Wunde befindet.)

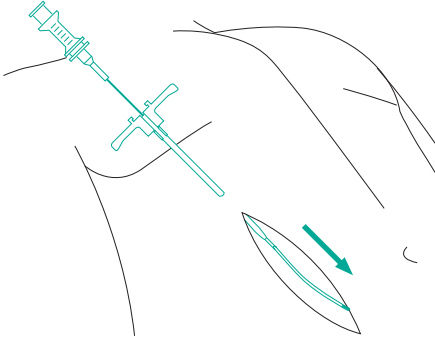

- 5 Teilen und entfernen Sie die Splitkanüle.

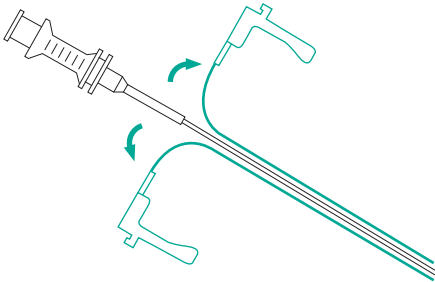


- 6 Überprüfen Sie den Durchfluss mit einer Erstinjektion Analgetikum.

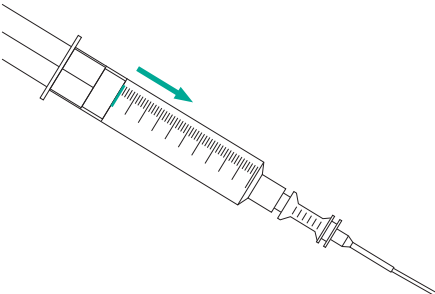


→ Katheter kann mit dem Filter konnektiert und mit dem FixoLong fixiert werden.

- 7 Verschließen Sie die Wunde. Stellen Sie sicher, dass der Katheter dabei nicht beschädigt wird.

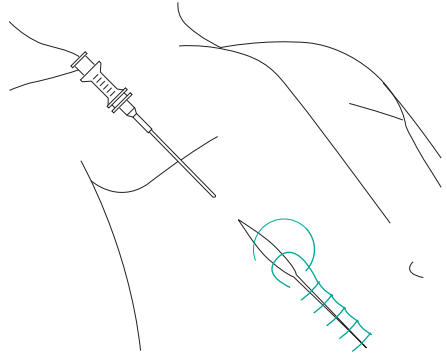


- 8 Fixieren Sie den Katheter mit dem FixoCath (optionales Zubehör) in der Nähe der Wunde.

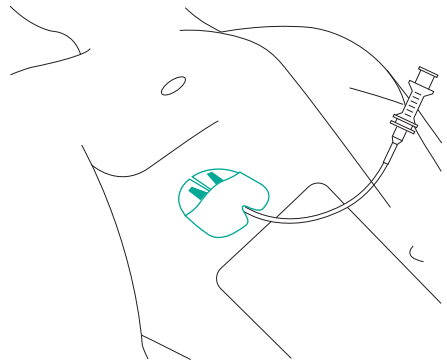

### Entfernen des Katheters

Entfernen Sie den FixoCath und /oder andere angebrachte Katheterfixierungen. Greifen Sie den Katheter nah an der Austrittsstelle und ziehen Sie vorsichtig am Katheter. Das Entfernen sollte einfach und nicht schmerzhaft sein.

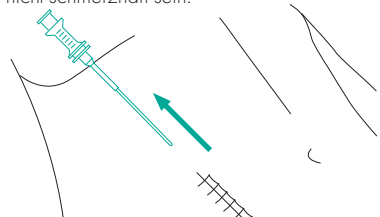

→ Prüfen Sie ob der Katheter vollständig entfernt wurde und ob das distale Ende intakt ist.

## Warnhinweise

- Der InfiltraLong Katheter sollte ausschließlich von geschultem medizinischen Fachpersonal unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung verwendet werden.
- Bei Verwendung in Kombination mit anderen Produkten ist es essentiell, dass die Kompatibilität und die Gebrauchsanweisungen dieser Produkte berücksichtigt werden. Die Entscheidung über die kombinierte Verwendung von Produkten anderer Hersteller obliegt der Verantwortung des Anwenders.
- Der InfiltraLong Katheter darf eine Anwendungsdauer von 120 Stunden nicht überschreiten. Beachten Sie, dass die Infektionsgefahr in Abhängigkeit der Verweildauer steigt.
- Die verwendeten Materialien dieses Produktes sind nicht dafür geeignet um wiederaufbereitet oder resterilisiert zu werden.
- Warnung vor spitzem Gegenstand: Das Produkt oder Produktbestandteile können, abhängig von der Schlifffart, scharfkantig oder spitz sein.
- Achten Sie stets auf aseptische Bedingungen an der Einstichstelle.
- Verabreichen Sie keine Medikamente, die nicht für den vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt sind.

**PAJUNK® GmbH Medizintechnologie**  
Hauptsitz  
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geislingen, Deutschland  
Tel.: +49 7704 9291-0  
Fax: +49 7704 9291-600  
info@pajunk.com  
pajunk.com

**PAJUNK® Medical System L.P.**  
USA  
4575 Marconi Drive  
Alpharetta, GA 30005, USA  
Tel.: +1 888 972 5865  
Fax: +1 678 514 3388  
info@pajunk-usa.com  
pajunkusa.com

**PAJUNK® Medical Produkte GmbH**  
Zentraleuropa  
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geislingen, Deutschland  
Tel.: +49 7704 8008-0  
Fax: +49 7704 8008-150  
info@pajunk-medipro.com  
pajunk.de

**PAJUNK® UK Medical Products Ltd**  
Großbritannien  
Unit D1 The Waterfront  
Goldcrest Way, Newburn Riverside  
Newcastle upon Tyne, NE15 8 NY, UK  
Tel.: +44 191 264 7333  
info@pajunk.co.uk  
pajunk.co.uk