


Gebrauchshinweise *InfiltraLong TUN*

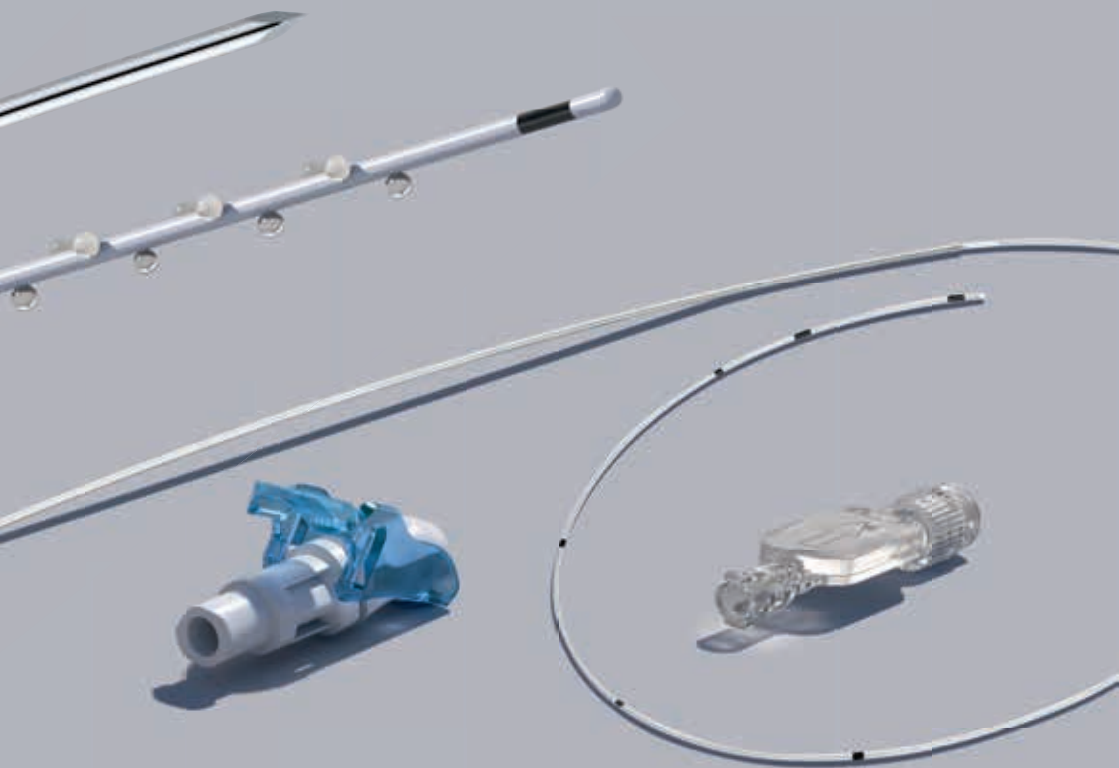


InfiltraLong

Der PAJUNK® InfiltraLong Katheter ist ein geschlossenes System für kontinuierliche Infiltrationsanalgésie bei chirurgischen Eingriffen.



Das Design des Katheters ermöglicht eine zuverlässige Verabreichung des Lokalanästhetikums. Dies ermöglicht eine Optimierung der Patientenanalgesie und die Verbesserung der Ergebnisse bei gleichzeitiger Reduzierung des Opioidverbrauchs. Die breite Produktpalette an Katheter- und Perforationslängen ermöglicht es, den InfiltraLong Katheter in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen einzusetzen. Im Vergleich zu drei handelsüblichen Kathetern, schnitt der InfiltraLong aufgrund der Vielzahl an feinen und präzisen Perforationen, die eng und gleichmäßig auf der Perforationslänge angeordnet sind, äußerst gut ab. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Analgetikums und eine frühere Mobilisierung des Patienten. Der InfiltraLong Katheter ist sowohl als Standardvariante als auch als Forte Variante mit dickerer Wandstärke erhältlich.

Der InfiltraLong Katheter ist so konzipiert, dass er mit allen handelsüblichen Infusionspumpen kompatibel ist. Die InfiltraLong Sets gibt es in vielen verschiedenen Konfigurationen, darunter befinden sich Basiskomponenten wie Kanüle und Filter oder auch als Komplettssets mit FuserPump.

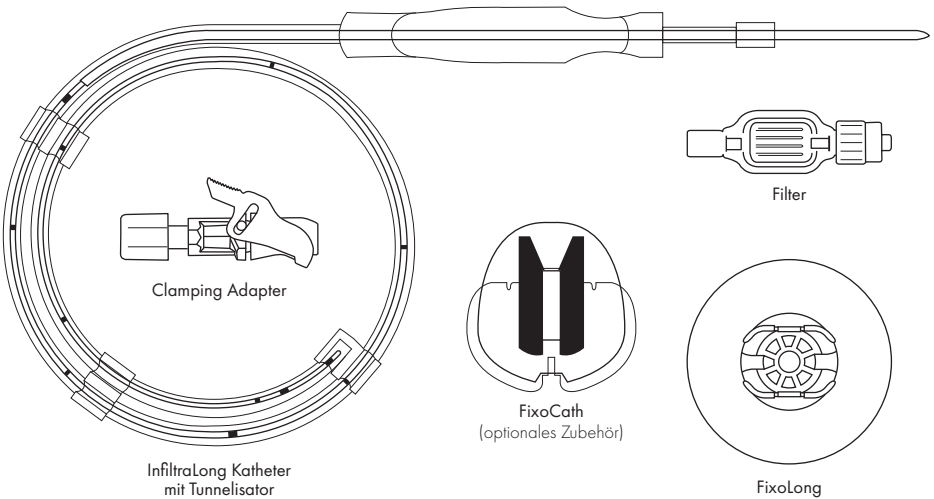


Anleitung

- 1 Ziehen Sie den Katheter komplett aus dem Kathetercontainer heraus.
- 2 Punktieren Sie die Haut vom Inneren der Wunde nach außen.

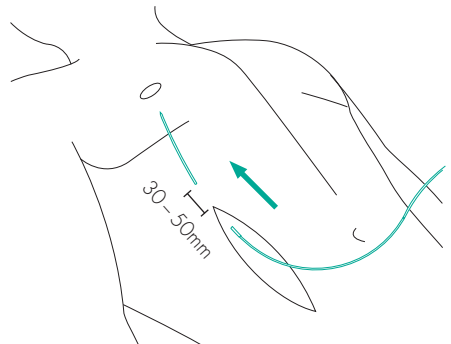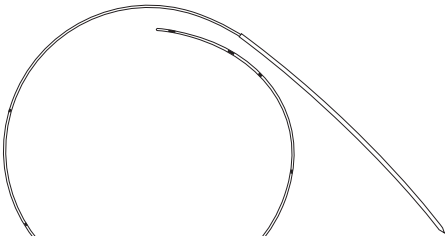


Warnhinweise:
Schneiden Sie den Katheter nicht ab.


- 3** Positionieren Sie die komplette Perforationslänge des Katheters in der Wunde. (Bitte stellen Sie sicher, dass sich das komplette Perforationssegment in der Wunde befindet.)

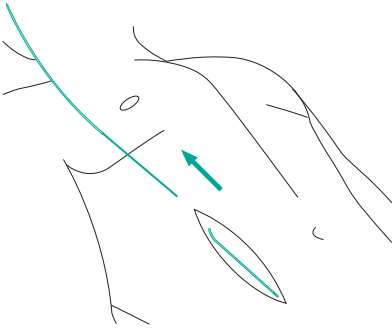

- 4** Entfernen Sie den Tunnelisator mit einer Drehbewegung vom Katheter. Ziehen Sie nicht am Katheter, bevor Sie diesen vom Tunnelisator abgeschraubt haben.

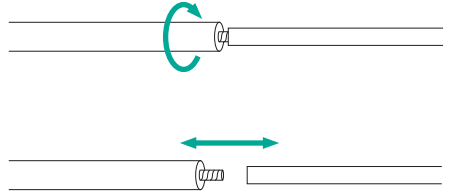


- 5** Stellen Sie sicher, dass der Katheter bis zur vorgesehenen Markierung in den Clamping Adapter eingeführt wurde, bevor Sie den Spannhebel schließen. Überprüfen Sie anschließend die Durchgängigkeit des Katheters in dem Sie eine Erstinjektion an Lokalanästhetikum injizieren.

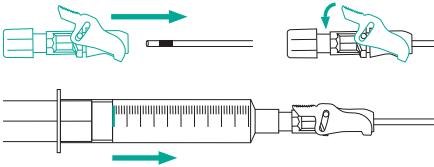


→ Der Katheter kann nun mit dem Filter konnektiert und der Filter mit dem FixoLong fixiert werden.

- 6** Verschließen Sie die Wunde. Stellen Sie sicher, dass der Katheter dabei nicht beschädigt wird.

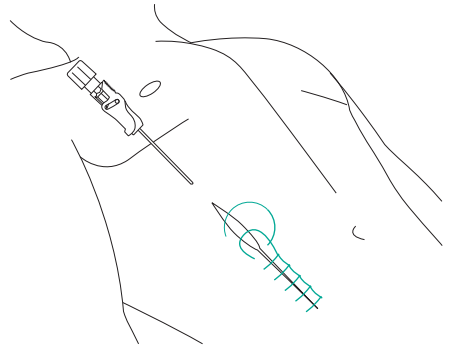


- 7** Fixieren Sie den Katheter mit dem FixoCath (optionales Zubehör) in der Nähe der Wunde.

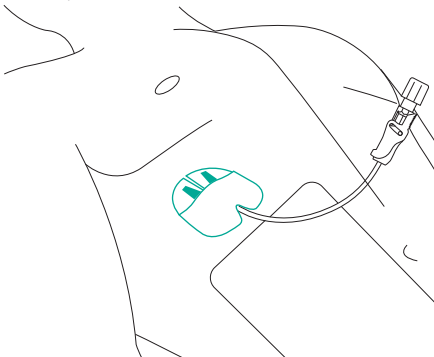

↻ Entfernen des Katheters

Entfernen Sie das FixoCath und / oder andere angebrachte Katheterfixierungen. Greifen Sie den Katheter nah an der Austrittsstelle und ziehen Sie vorsichtig am Katheter. Das Entfernen sollte einfach und nicht schmerzhaft sein.

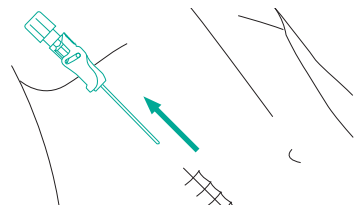

→ Prüfen Sie, ob der Katheter vollständig entfernt wurde und ob das distale Ende intakt ist.

Warnhinweise

- Der InfiltraLong Katheter sollte ausschließlich von geschultem medizinischen Fachpersonal, unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Bei Verwendung in Kombination mit anderen Produkten, ist es essentiell, dass die Kompatibilität und die Gebrauchsanweisungen dieser Produkte berücksichtigt werden. Die Entscheidung über die kombinierte Verwendung von Produkten anderer Hersteller obliegt der Verantwortung des Anwenders.
- Der InfiltraLong Katheter darf eine Anwendungsdauer von 120 Stunden nicht überschreiten. Beachten Sie, dass die Infektionsgefahr in Abhängigkeit zur Verweildauer steigt.
- Die verwendeten Materialien dieses Produktes sind nicht dafür geeignet um wiederaufbereitet oder resterilisiert zu werden.
- Warnung vor spitzem Gegenstand: Das Produkt oder Produktbestandteile können, abhängig von der Schlifffart, scharfkantig oder spitz sein.
- Achten Sie stets auf aseptische Bedingungen an der Einstichstelle.
- Verabreichen Sie keine Medikamente, die nicht für den vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt sind.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie
Hauptsitz

Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 9291-0
Fax: +49 7704 9291-600
info@pajunk.com
pajunk.com

PAJUNK® Medical System L.P.
USA

4575 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005, USA
Tel.: +1 888 972 5865
Fax: +1 678 514 3388
info@pajunk-usa.com
pajunkusa.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH
Zentraleuropa

Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 8008-0
Fax: +49 7704 8008-150
info@pajunk-medipro.com
pajunk.de

PAJUNK® UK Medical Products Ltd
Großbritannien

Unit D1 The Waterfront
Goldcrest Way, Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne, NE15 8 NY, UK
Tel.: +44 191 264 7333
info@pajunk.co.uk
pajunk.co.uk